


panthera

Monteringsanvisning amputationsbenstöd

art.nr.6760501 / 2



Montering på S2, S3

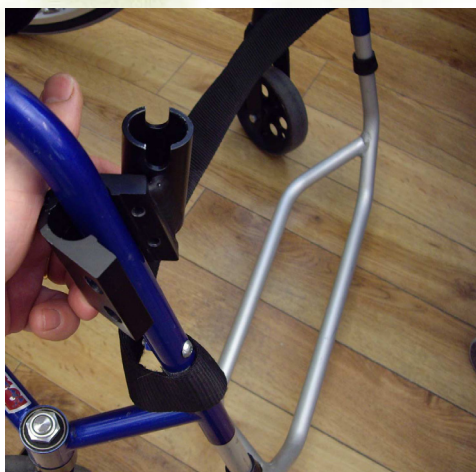


- 1) Skruva ut skruvarna på fästet som ska sitta runt ramröret.
- 2) Öppna upp fästet och trä det runt det ramrör där det ska sitta. I detta fall ett högermonterat amp.stöd.




Dra åt skruvarna lite löst så att det går att justera sen.



Sätt ditt ampstödsplattans rör i fästets rör.

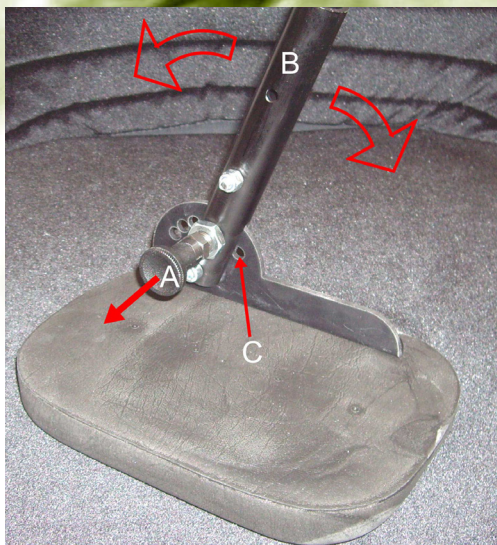

Justera ampstödsplattans vinkel genom att dra spak "A" rakt ut, vinkla sen röret "B" till önskad vinkel och tryck sen tillbaka spaken i något av de 7 borrarade hålen "C".

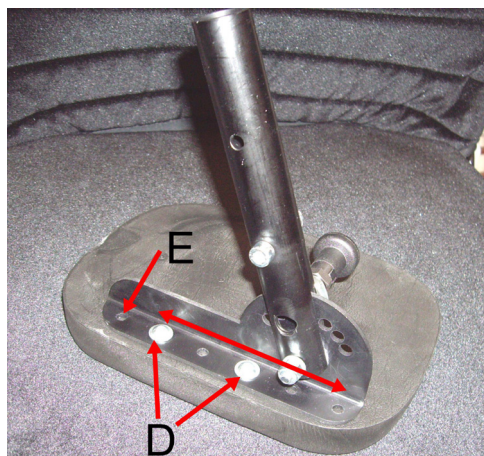

Det går även att justera plattans läge i djupled. Lossa skruvarna "D" och flytta plattan till ett nytt läge. Det finns 6 förborrade hål "E" att använda.




När rätt inställning är gjord så avsluta monteringen med att dra åt skruvarna på fästet ordentligt.



Montering på S2/S3 swing

På S2/S3 Swing så monteras fästet på det svängbara benstödsfästet, enl. bild. Fotplattan på benstödet behöver inte monteras bort om man önskar ha kvar det.

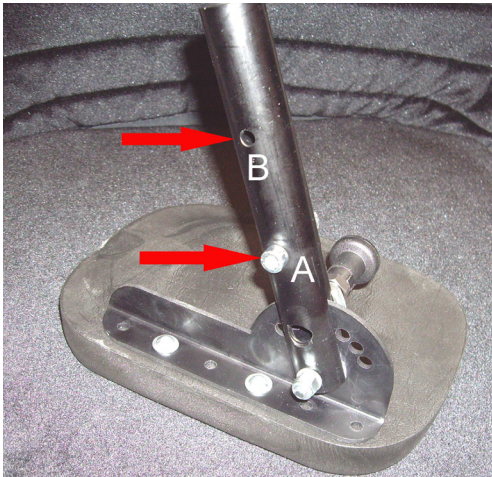

När amputationsstödet används på S2 swing så behöver man flytta stoppskruven "A" till position "B", för att stödet ska hamna på rätt höjd till sittdynan. Annars är monteringen densamma som för S2.

Montering på U2/U3



På U2/U3 görs monteringen på samma sätt som på S2/S3 men man får vända på amputationsstödsplatta 180 grader så att den hamnar i rätt läge i förhållande till sitsen.