

Monteringsanvisning för låg broms

Så här monterar du din låga broms:

1. Kontrollera att du har samma bredd på bromsen som på stolen.



Bild 2

3. Fäst bromspaketet på chassit. Dra åt försiktigt.



Bild 4

5. Fäll in bromsarmarna, backa bromspaketet 3-4mm. Drag först åt den vänstra bromsen, därefter den högra. Se till att bromsarmarna fälls in ordentligt när bromsen låses upp. Är det trögt skall du vrida det högra bromspaketet upp/ner tills du finner det läge där bromsarmen lätt returnerar.



Bild 1

2. Lossa på muttern som håller klämmorna.



Bild 3

4. Fäll ut bromsarmarna så att de ligger an mot däck.



Bild 5

Var god vänd sida!

panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se

Monteringsanvisning för låg broms

6. Avståndet (A) skall vara samma på bägge sidor. På 24" standardhjul är avståndet (A) ungefär 230-234 mm, beroende på hur hårt man vill att bromsen skall ligga an. Om man har 26" hjul är detta avstånd ungefär 255-257 mm. Observera att detta mått kan variera beroende på vilken typ av däck du har på din rullstol, däcksmönstret ser olika ut på olika typer av däck.

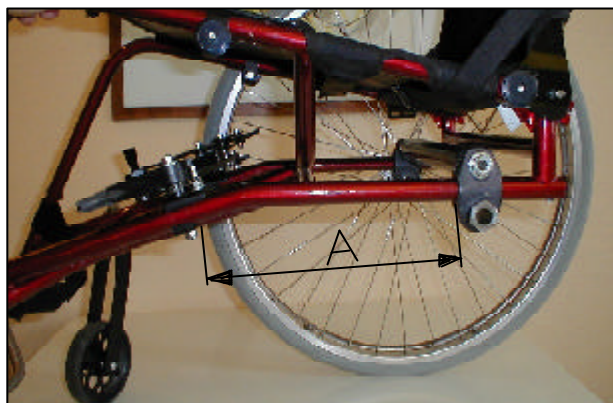


Bild 6



Bild 7

7. Tänk på att bromsen behöver rengöras och smörjas regelbundet. Speciellt vintertid.