

MONTERINGSANVISNING

Vinkelställbar Fotplatta Carbon S3/U3



Ingående artiklar & Verktyg


Art.Nr 65140BB Fotplatta S3 Vinkelställbar

Art.Nr 65150BB Fotplatta U3 Vinkelställbar

(BB står för fotplattans bredd)

Följande verktyg behövs för att montera fotplattan på rullstolen.

- Insexnyckel 3 mm
- Insexnyckel 5 mm

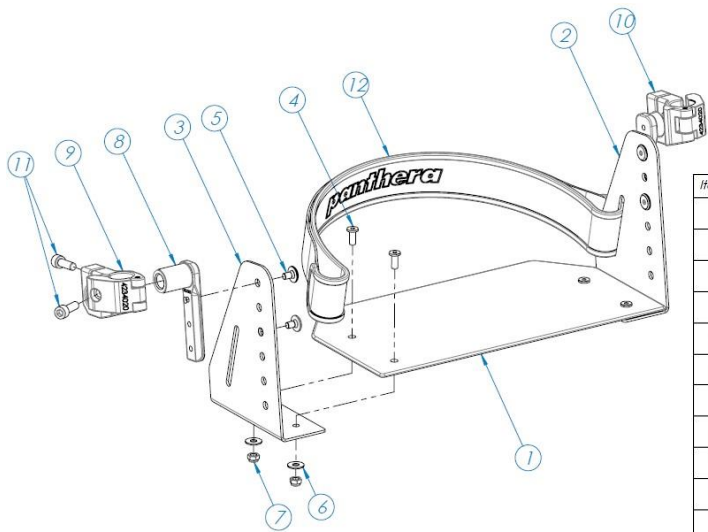


Sprängskiss Fotplatta Carbon

Item no	qty	Swedish Description	English Description	Weight	PartNo
1	1	Platta carbon (3mm)	Plate carbon (3mm)	126.14	See table
2	1	Fästsida Fotplatta carbon vä	Attachment foot plate carbon left	73.42	6506011
3	1	Fästsida Fotplatta carbon hö	Attachment foot plate carbon right	73.42	6506012
4	4	Bult MELC6S M5x12 FZB Svart	BN 1206 M5x12 Oxidized Black	2.34	6004512C
5	4	Bult MELC6S M5x8 FZSV	Bolt MELC6S M5x8 FZSV	3.02	6004588
6	4	Nitbricka M5x13x1 fzb	Washer M5x13x1	0.86	8000513
7	4	Mutter DIN 985 M5 låg nylock fzb	Lock nut DIN 985 steel M5 fzb	1.21	7000050
8	2	Fäste vinkelställbar fotplatta	Attachment angle-adjust. foot plate	37.05	6506050
9	1	Klämma B3 Sida kpl hö	Clamp B3 Side cpl. right	73.82	4234042
10	1	Klämma B3 Sida kpl vä	Clamp B3 Side cpl. left	73.82	4234041
11	4	Bult MC6S M6x18 12.9 FZSV	Bolt MC6S M6x18 12.9 FZSV	7.04	6002648
12	1	Vadband Panthera	Calf strap Panthera	42.0	See table

Assembly Art.No	Assembly Description	Pos 1 Part. No	Pos 1 Width (A)	Pos 12 Part. No
S3				
6514030	Fotplatta S3 vinkelställbar br 30	6500238	238	3700230
6514033	Fotplatta S3 vinkelställbar br 33	6500268	268	3700230
6514036	Fotplatta S3 vinkelställbar br 36	6500298	298	3700233
6514039	Fotplatta S3 vinkelställbar br 39	6500328	328	3700236
6514042	Fotplatta S3 vinkelställbar br 42	6500358	358	3700239
6514045	Fotplatta S3 vinkelställbar br 45	Note 1)	388	3700242
6514050	Fotplatta S3 vinkelställbar br 50	Note 1)	438	3700245
U3				
6515033	Fotplatta U3 vinkelställbar br 33	6500188	188	3700230
6515036	Fotplatta U3 vinkelställbar br 36	6500218	218	3700230
6515039	Fotplatta U3 vinkelställbar br 39	6500248	248	3700233
6515042	Fotplatta U3 vinkelställbar br 42	6500278	278	3700236
6515045	Fotplatta U3 vinkelställbar br 45	6500308	308	3700239

Note 1) Manufactured (6 mm) by Special Adaptation at Panthera

MONTERINGSANVISNING

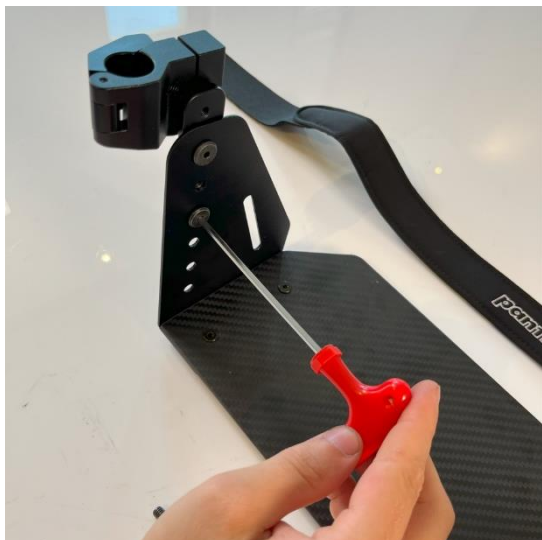

Steg 1

Skruva fast klämmorna (8–10) i önskad höjd på fotplattans fästsidor (2,3) med 2 st bult (5). Använd en insexnyckel 3 mm.


OBS! Se till att klämmorna är vända åt rätt håll (i enlighet med bilden).

Vi rekommenderar att ha ett tomt hål mellan bultarna.



Steg 2

Placera ut fotplattan med klämmor i önskad höjd på ramröret.

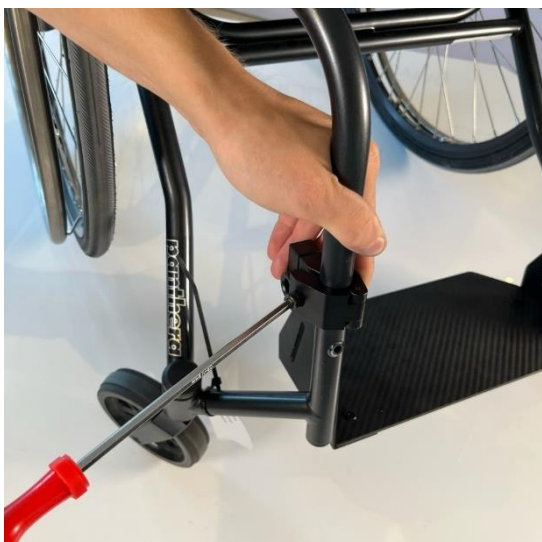

Steg 3

Fäll ihop klämmorna och skruva fast dem i det önskade läget med 1 st bult (11). Använd en insexnyckel 5 mm.

MONTERINGSANVISNING



Steg 4

Dra fotplattan till önskad vinkel och fäst den genom att dra åt 1 st bult (11) på baksidan av klämman. Använd insexnyckel 5 mm.



Steg 5

Om det önskas, montera vadbandet (12) genom att trä det genom de två hålen bak på fästsidorna (2,3) och fäst kardborren.

Klart!

MONTERINGSANVISNING



Alternativ montering

Önskas ett högre läge på fotplattan eller en annan vinkel kan fotplattan monteras som bilden visar.

Lossa bulten (11) på baksidan av klämmorna samt de 2 st bultarna (5) på fotplattans fästsidor.

Rotera sedan de vinkelställbara fästena (8) och skruva tillbaka bultarna när önskad höjd och vinkel hittats.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Footplate Carbon Angle-Adjust S3/U3



Part Numbers and Tools


65140WW Footplate S3 Angle-Adjust

65150WW Footplate U3 Angle-Adjust

(WW stands for the width of the footplate)

The following tools are needed to mount the footplate on the wheelchair.

- Allen key 3 mm
- Allen key 5 mm

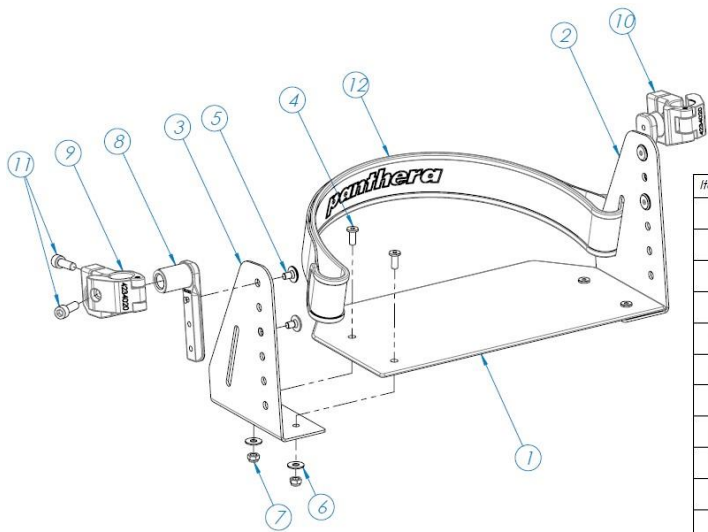


Exploded View Footplate Angle-Adjust

Item no	qty	Swedish Description	English Description	Weight	PartNo
1	1	Platta carbon (3mm)	Plate carbon (3mm)	126.14	See table
2	1	Fästsida Fotplatta carbon vän	Attachment foot plate carbon left	73.42	6506011
3	1	Fästsida Fotplatta carbon hö	Attachment foot plate carbon right	73.42	6506012
4	4	Bult MELC6S M5x12 FZB Svart	BN 1206 M5x12 Oxidized Black	2.34	6004512C
5	4	Bult MELC6S M5x8 FZSV	Bolt MELC6S M5x8 FZSV	3.02	6004588
6	4	Nitbricka M5x13x1 fzb	Washer M5x13x1	0.86	8000513
7	4	Mutter DIN 985 M5 låg nylock fzb	Lock nut DIN 985 steel M5 fzb	1.21	7000050
8	2	Fäste vinkelställbar fotplatta	Attachment angle-adjust. foot plate	37.05	6506050
9	1	Klämma B3 Sida kpl hö	Clamp B3 Side cpl. right	73.82	4234042
10	1	Klämma B3 Sida kpl vän	Clamp B3 Side cpl. left	73.82	4234041
11	4	Bult MC6S M6x18 12.9 FZSV	Bolt MC6S M6x18 12.9 FZSV	7.04	6002648
12	1	Vadband Panthera	Calf strap Panthera	42.0	See table

Assembly Art.No	Assembly Description	Pos 1 Part. No	Pos 1 Width (A)	Pos 12 Part. No
S3				
6514030	Fotplatta S3 vinkelställbar br 30	6500238	238	3700230
6514033	Fotplatta S3 vinkelställbar br 33	6500268	268	3700230
6514036	Fotplatta S3 vinkelställbar br 36	6500298	298	3700233
6514039	Fotplatta S3 vinkelställbar br 39	6500328	328	3700236
6514042	Fotplatta S3 vinkelställbar br 42	6500358	358	3700239
6514045	Fotplatta S3 vinkelställbar br 45	Note 1)	388	3700242
6514050	Fotplatta S3 vinkelställbar br 50	Note 1)	438	3700245
U3				
6515033	Fotplatta U3 vinkelställbar br 33	6500188	188	3700230
6515036	Fotplatta U3 vinkelställbar br 36	6500218	218	3700230
6515039	Fotplatta U3 vinkelställbar br 39	6500248	248	3700233
6515042	Fotplatta U3 vinkelställbar br 42	6500278	278	3700236
6515045	Fotplatta U3 vinkelställbar br 45	6500308	308	3700239

Note 1) Manufactured (6 mm) by Special Adaptation at Panthera

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

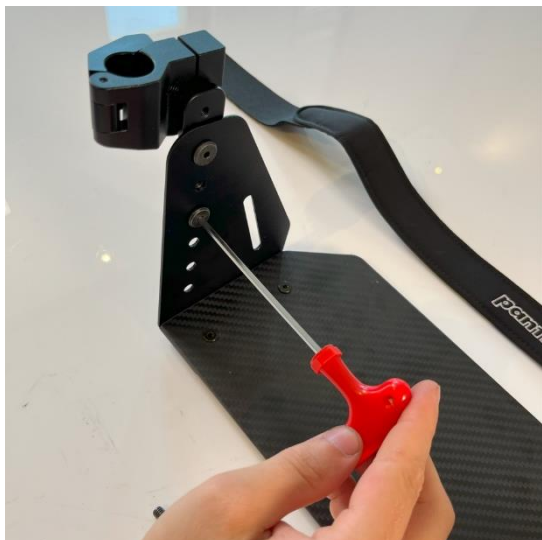

Step 1

Decide on a desired height and fasten the clamps (8-10) onto the attachment plate (2,3) of the footplate with 2 bolts (5). Use a 3 mm Allen key.


Note! Make sure the clamps are facing the right way (as shown in the picture).

We recommend having an empty hole between the bolts.



Step 2

Place the footplate with clamps at the desired height on the frame tube.

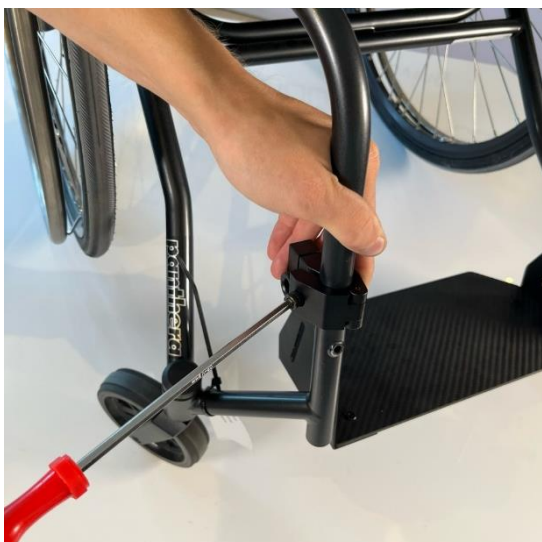

Step 3

Fold the clamp together and fasten it with 1 bolt (11). Use a 5 mm Allen key.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Step 4

Move the footplate to the desired angle and secure it by tightening 1 bolt (11) on the back of the clamp. Use a 5 mm Allen key.



Step 5

If desired, install the calf strap (12) by threading it through the two holes at the back of the attachment plate (2,3) and attach the Velcro.

Done!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Alternative mounting

If a higher position or a different angle on the footplate is desired, the footplate can be mounted as shown in the picture.

Loosen the bolt (11) on the back of the clamps and the 2 bolts (5) on the attachment plates.

Then rotate the angle-adjustable attachment (8) and fasten the bolts when the desired height and angle have been found.