

## ALTERNATIV BROMS TILL SWING

Om man är i behov av att bredda bromsen på Panthera Swing, vid t.ex. användning av eldrivhjul, så skall broms med art.nr. 460 00 80 användas.

Denna kan breddas för att man ska få korrekt anlägg mot däcket för fullgod bromsverkan.

Detta gäller även för Panthera Swing-kort där man med denna broms kan flytta fram bakaxeln upp till 45 mm från standardvärdet 0 mm.

**OBS!** De svängbara benstöden tar i bromsen när man flyttar fram bakaxeln på Swing-kort men benstöden kan fortfarande svängas inåt och lyftas av.

Bromsen kan även användas utan breddning för den som föredrar denna äldre broms-typ.

Hög broms förlängd rak bromsspak, komplett par	art.nr: 460 00 80
Hög broms förlängd rak bromsspak, vänster	art.nr: 460 00 81
Hög broms förlängd rak bromsspak, höger	art.nr: 460 00 82



# panthera

Panthera AB

Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga

Tel. 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10

panthera@panthera.se www.panthera.se