

Infoblad 2010-4

Rev: 2018-01


ANPASSNING AV HÖJDJUSTERINGEN PÅ FOTBÅGE (S2, S3, U2, U3, U2 light, U3 light, S2 swing, S3 swing)

För en del brukare räcker inte höjdjusteringen av fotbågen till. Då finns möjligheten att kapa av en del av ramröret och anpassa fotbågen med nya hål, för att på så sätt kunna justera upp fotbågen till en högre position. På detta sätt kan man justera upp fotbågen ytterligare **ca 20-30 mm**.

OBS! Denna anpassning är godkänd av Panthera AB med bibehållen CE märkning om den utföres enligt denna instruktion!



Demontera fotbågen på stolen. Kapa av ramröret så mycket som behövs, lika på båda sidor. Fila bort alla grader.

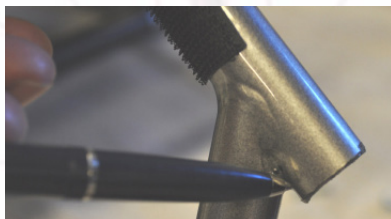

Se till att lämna en liten kant kvar på minst 5 mm.
Svetsfogen får EJ bli skadad!



Anpassa plastpluggarna så att den passar på det kortare ramröret.



Borra ett nytt höjdjusteringshål (dia. 5,4 mm) i fotstödet på båda sidor, så att fotstödet hamnar på önskad höjd. OBS! Borrhålen får ej ligga närmare varandra än C-C 8 mm.

Montera tillbaka fotbågen på stolen