

panthera®

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

Infoblad 2010-5

2010-11-10

NY STANDARDBAKAXEL PÅ BAMBINO 24 cm

Fr.o.m. den 18:e Oktober 2010 inför vi en ny standardbakaxel på Bambino bredd 24 cm. Tidigare använde vi en kolfiberaxel med cambervinkel 2 grader men nu har vi en stålbackaxel med cambervinkel 8 grader som ny standardbakaxel. Camberaxeln ökar den vertikala vinkeln på drivhjulen. Detta för att förbättra körbarheten och göra Bambino 24 cm än mera lättsvängd. Dessutom ökas stabiliteten markant.


Det går naturligtvis att även fortsättningsvis använda carbonbakaxeln om man önskar det. Detta anges då i beställningsguiden för Bambino.

55 cm blir totalbredden för Bambino 24 med camberbakaxel 8 grader och 22" drivhjul.

45 cm blir totalbredden för Bambino 24 med carbonbakaxel och 22" drivhjul.




Bambino 24

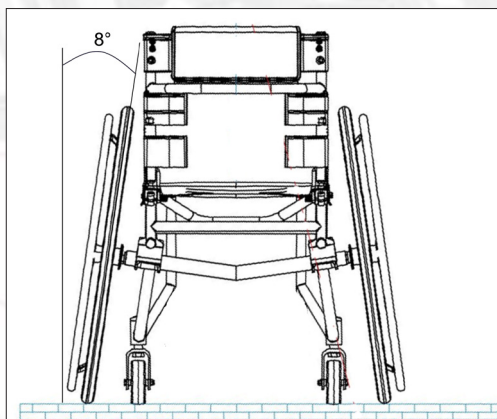

Camberaxel 8 grader ökar vinkeln på drivhjulen.



Carbon bakaxel

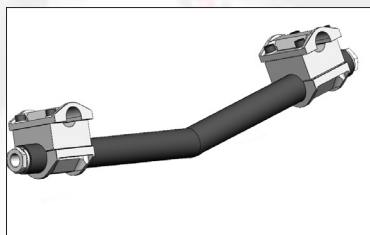

Camber bakaxel 8gr