

# panthera®

Infoblad 2011-01

2011-03-30

## Quick release på enhandsdrift

Fr.o.m. 2011-01-01 så levereras alla enhandsdrift med quick releasefunktion (QR).

Det innebär att man lättare kan demontera drivhjulen från rullstolen vid transport.

Genom att demontera den fjäderbelastade drivaxeln (3) och lossa på två stycken låssprintar kan man enkelt dra loss drivhjulen från sina fästen.

Enhandsdrift används tillsammans med den raka stålbackaxeln (2) utan camber som beställs separat liksom drivaxeln vid beställning av komplett enhandsdrift.

Vid beställning så välj diameter på drivhjulen och med vilken typ av drivring, aluminium eller friktionsdrivring. Välj också stålaxel och drivaxel för aktuell stolsbredd.

Enhandsdrift passar till alla stolar utom Micro, BT, U2 light och Panthera X.

Se nästa sida för artikelnummer!





## Artikelnummer för enhandsdrift med QR:

Består av 2st drivhjul med axelfästen och med 2st drivringar på ena drivhjulet.

art.nr. 1101520	Drivhjul 20" enhandsdrift med QR	med aluminium-ring par komplett	1
art.nr. 1101530	Drivhjul 20" enhandsdrift med QR	med friktions-ring par komplett	
art.nr. 1101522	Drivhjul 22" enhandsdrift med QR	med aluminium-ring par komplett	1
art.nr. 1101532	Drivhjul 22" enhandsdrift med QR	med friktions-ring par komplett	
art.nr. 1101524	Drivhjul 24" enhandsdrift med QR	med aluminium-ring par komplett	1
art.nr. 1101534	Drivhjul 24" enhandsdrift med QR	med friktions-ring par komplett	
art.nr. 1101526	Drivhjul 26" enhandsdrift med QR	med aluminium-ring par komplett	1
art.nr. 1101536	Drivhjul 24" enhandsdrift med QR	med friktions-ring par komplett	

## Artikelnummer för stålbakaxel:

art.nr. 3301127	Rör bakaxel kpl m. bult 27	(stolsbredd 27)	2
art.nr. 3301130	Rör bakaxel kpl m. bult 30	(stolsbredd 30)	
art.nr. 3301133	Rör bakaxel kpl m. bult 33	(stolsbredd 33)	2
art.nr. 3301136	Rör bakaxel kpl m. bult 36	(stolsbredd 36)	
art.nr. 3301139	Rör bakaxel kpl m. bult 39	(stolsbredd 39)	2
art.nr. 3301142	Rör bakaxel kpl m. bult 42	(stolsbredd 42)	
art.nr. 3301145	Rör bakaxel kpl m. bult 45	(stolsbredd 45)	2
art.nr. 3301150	Rör bakaxel kpl m. bult 50	(stolsbredd 50)	

## Artikelnummer för drivaxel:

art.nr. 1100360	Drivaxel enhandsdrift konisk 195-235/27	(stolsbredd 27)	3
art.nr. 1100361	Drivaxel enhandsdrift konisk 220-275/30-33	(stolsbredd 30-33)	
art.nr. 1100362	Drivaxel enhandsdrift konisk 255-315/33-36	(stolsbredd 33-36)	3
art.nr. 1100363	Drivaxel enhandsdrift konisk 295-370/39-42	(stolsbredd 39-42)	
art.nr. 1100364	Drivaxel enhandsdrift konisk 350-460/42-50	(stolsbredd 42-50)	3