

Bromsjustering på Panthera X

På stolar som har en U2 light broms monterad.




Grovjustering

För att grovjustera bromsen, modell U2 light, på Panthera X så lossa först skruvarna till bromsinfästningen (1) med en 15 mm blocknyckel. Lossa både vänster och höger sida så mycket att det går att skjuta bromsen längs fästet (2).

Drag åt skruvarna (1) lätt vid lämplig justering och prova att bromsa. Justera så mycket att bromsbladet skär in i däckets ca 5 mm i bromsat läget. När rätt läge har justerats in så drag åt skruvarna (1).

OBS Viktigt! Drag inte åt skruvarna (1) för hårt då infästningen kan gå sönder!

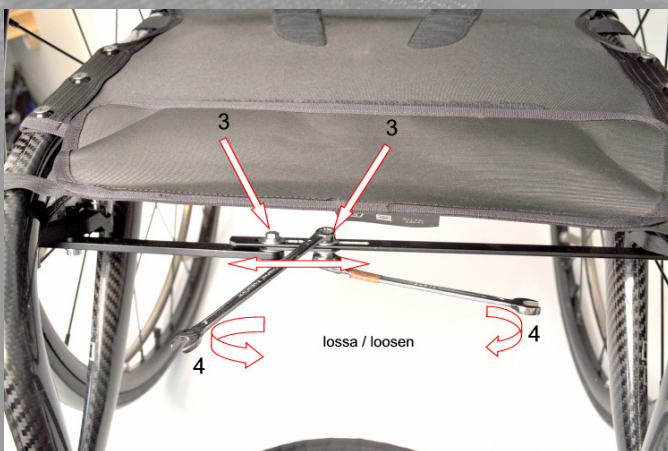

Finjustering

Vid behov kan man finjustera bromsen genom att lossa skruvarna (3) med två stycken 8 mm blocknycklar (4).

Lossa så mycket att bultarna går att justera i spåren. Justera genom att flytta bultarna till ett nytt läge i spåren och drag åt skruvarna (3). Prova att bromsa. Justera så mycket att bromsbladet skär in i däckets ca 5 mm i bromsat läget.



Rätt justerad

Rätt justerad så ska bromsbladen, vid aktiverad broms, skära in ca 5 mm i de fullpumpade däcken (8 bar).