

panthera®

Infoblad 2013-04
2013-05-28


Montering av drivring på vårt nya 24" standarddrivhjul



Med vårt nya 24" standarddrivhjul så blir demontering / montering av drivringen betydligt enklare då man inte behöver lossa på däck och slang.

Drivringen är monterad med 6 st M5x12 mm skruvar med Torxhuvud (storlek T25) som skruvas mot fälgen inifrån, från navsidan sett.

Äldre drivringar som passar det äldre standardhjulet kommer inte passa det nya då de har olika in-nerdiametrar på fälgen. Däremot passar drivringar till Spinergy hjulen det nya standarddrivhjulet.

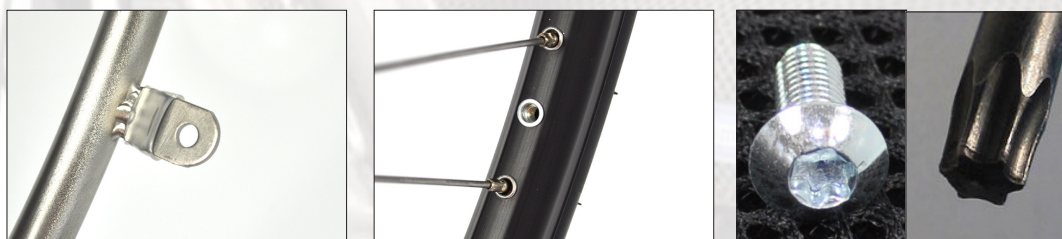

Fästöra (6 st) på drivringen som passar på förborrat / gängat hål på fälgen och fästes med M5x12 mm skruv och dras åt med ett Torxverktyg (storlek T25).

Drivhjul	art.nr.	Drivring	art.nr.
Drivhjul 24" 6P utan drivring	1300000	Drivring titan för 24"hjul 6P 510mm	1902411
Drivhjul 24" 6P utan drivring och däck	1300000R	Drivring titan för 24"hjul 6P 510mm light	1902412
Drivhjul 24" 6P ej drivring PU däck	1300001	Drivring ALU för 24"hjul 6P 510mm	1902430
Drivhjul 24" 6P Drivring Alu	1300010	Drivring MaxGrepp 24"hjul 6P 510mm	1903060
Drivhjul 24" 6P Drivring Alu PU däck	1300011	Drivring Geleplast för 24" 6P 510mm	1904204
Drivhjul 24" 6P Drivring Titan	1300020	Drivring Geleplast för 24"hjul 6P	1904214
Drivhjul 24" 6P Drivring Titan utan däck	1300020R	Drivring PRC för 24"hjul 6P 510mm för 24" SPOX och 6P	1904304
Drivhjul 24" 6P Drivring Titan PU däck	1300021	Drivring Para för 24"hjul 6P 510mm	1905124
Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn	1300030	Drivring Tetra för 24"hjul 6P 510mm	1905224
Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn utan däck	1300030R		
Drivhjul 24" 6P Drivring MG PU däck	1300031		
Drivhjul 24" 6P Drivring GelePlast	1300040		
Drivhjul 24" 6P Drivring GelePlast utan däck	1300040R		
Drivhjul 24" 6P Drivring Tetra PU däck	1300041		
Drivhjul 24" 6P Drivring PRC grå	1300050		
Drivhjul 24" 6P Drivring PRC grå utan däck	1300050R		