



Infoblad 2013-05  
2013-09-24

## Transportskydd för chassit till Panthera X

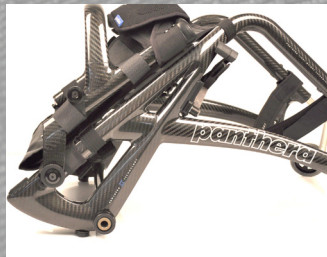

Vid lyft av rullstol i och ur t.ex. bilen så kan chassit stöta i asfalten och få skrapmärken. För att skydda de mest utsatta delarna av kolfiberchassit på Panthera X har vi tagit fram skydds-kit. Vikt med alla skydden monterade på stol: **88g**.

**OBS!** Monteringen av art.nr. **9024007** innebär åverkan på chassit, dvs. borra hål och montera popnit. För att garantin ska gälla på chassit så ska denna montering **göras av Panthera**.

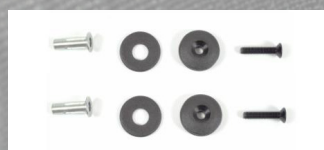

Delar som ingår i skydds-kiten.

art.nr. 9024007 Skydd bakstycke X


OBS! Montering ska göras av Panthera



art.nr. 9024008 Skydd bakaxel X



art.nr. 9024009 Skydd lagerhylsa X

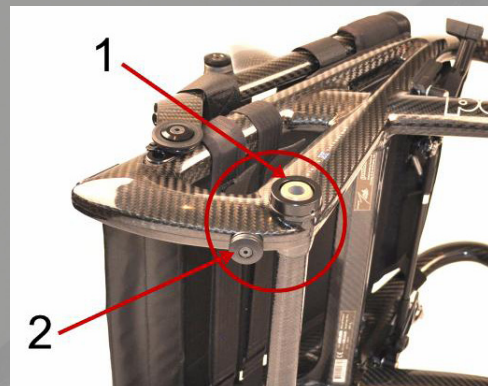

1) Vid bakaxeln där den sticker ut monteras en skyddsring av aluminium med skruvar. art.nr. **9024008**

2) På bakre delen av chassit skruvas ett plastskydd fast med skruv och popnit. art.nr. **9024007**  
(OBS! Innebär åverkan på chassit som påverkar garantin och ska utföras av Panthera)

3) Vid framgaffelfästningen utsida limmas ett aluminiumskydd fast.  
art.nr. **9024009**