

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

Distanser till Spiderwheels


I och med att man monterar Spiderwheels på en stol, så breddas stolen 2 mm på varje sida. För att kompensera för den extra bredd som Spiderwheels ger stolen, så kan man byta ut distansen vid mutterstycket till en smalare variant.

T.ex om du har "Sidoskydd med skärm" eller "Armstöd" på din stol, så har du en 16 mm distans vid mutterstycket på din bakaxel. Då kan denna bytas ut mot en distans som är 12 mm när du använder Spiderwheels.



Om du har "Sidoskydd, plast" eller "Sidoskydd, aluminium" på din stol, så har du en 12 mm distans vid mutterstycket på din bakaxel. Då kan denna bytas ut mot en distans som är 8 mm när du använder Spiderwheels.

I och med att man byter distans, blir stolen 2 mm smalare på varje sida, alltså totalt 4 mm smalare. Detta byte av distans rekommenderar vi för att stolen inte ska bli onödigt bred.

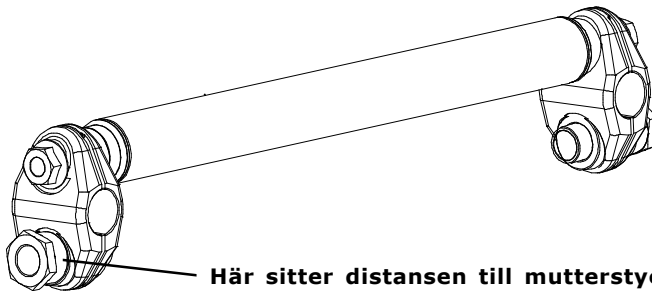

Här sitter distansen till mutterstycket.

(Den kan bytas till en smalare variant när man byter till Spiderwheels)

Om du vill beställa nya distanser till mutterstycket, se nedan för artikelnummer och pris.

Benämning	Art. nr	Pris / st
Distans mutterstycke, 8 mm	901 80 08	20 SEK
Distans mutterstycke, 12 mm	901 80 10	20 SEK
Distans mutterstycke, 16 mm	901 80 16	20 SEK