

BAKAXEL BAMBINO 6° CAMBER




Monteringsanvisning för: Bakaxel Bambino 6° Camber

art.nr. 3362416 Camberaxel sats 24 6° 26 mm
art.nr. 3362716 Camberaxel sats 27 6° 26 mm
art.nr. 3363016 Camberaxel sats 30 6° 26 mm
art.nr. 3363316 Camberaxel sats 33 6° 26 mm

Verktyg som behövs:
4 mm insexnyckel, tumstock



QR Länk till video

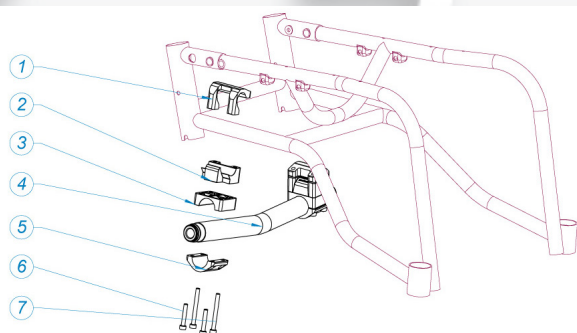


Sprängskiss för bakaxel Bambino 6°

1) Vänd rullstolen upp och ned. Börja med att placera del 1, i sprängskissen, på chassit. Notera hur den är vänd med de långa "benen" på utsidan av chassit.

2) Placera sen del 2 ovanpå del 1.

3) Placera del 3 ovanpå del 2.

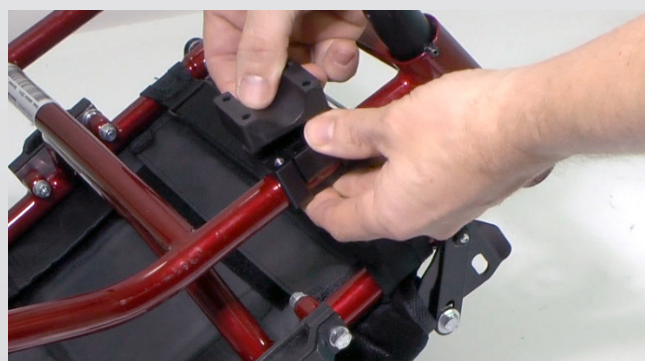



4) Placera del 5 ovanpå del 3.



5) Montera skruvarna genom delarna. De två långa skruvarna ska sitta mot insidan av chassist och de två kortare mot utsidan.



6) Drag åt skruvarna löst, något varv, med insexnyckel 4 mm.



7) För in bakaxeln i fästet och fortsätt sen med att montera fästet på andra sidan som görs på samma sätt.



8) Innan del 5 monteras så placera bakaxeln i fästet



9) Placera del 5 över bakaxeln och montera skruvarna och drag åt dem lite löst.




10) Vrid in bakaxeln så att caber-vinkeln blir rätt. Utbuktningen skall vara vänd mot golvet, när rullstolen är rättvänd.



11) Justera bakaxelinställningen till önskat mått på båda sidor.

Standard är 22 mm eller 52 mm med framflyttad rygg, bredd 24 cm.

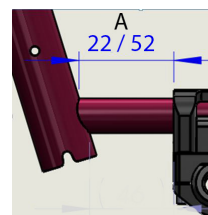

12) Drag slutligen åt alla 8 skruvarna ordentligt.

REAR AXLE BAMBINO 6° CAMBER


Assembly instruction for: Rear axle Bambino 6° Camber

art.no. 3362416 Camberaxle kit 24 6° 26 mm
 art.no. 3362716 Camberaxle kit 27 6° 26 mm
 art.no. 3363016 Camberaxle kit 30 6° 26 mm
 art.no. 3363316 Camberaxle kit 33 6° 26 mm

Tools needed
 4 mm allen key.
 Ruler



QR Link to video

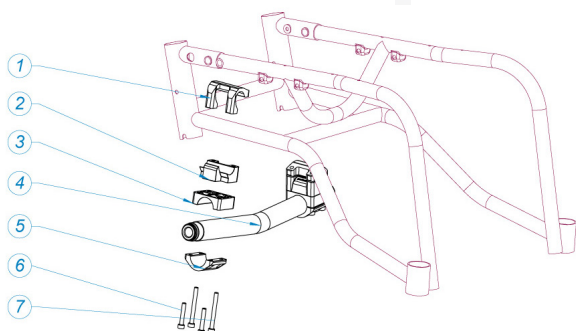


Exploded view for rear axle Bambino 6°

1) Turn the wheelchair upside down. Star mounting part 1, in the exploded view, on the chassis. Note how the part is positioned, with the long "legs" facing out from the chassis.

2) Then place part 2 on part 1.

3) Place part 3 on part 2.

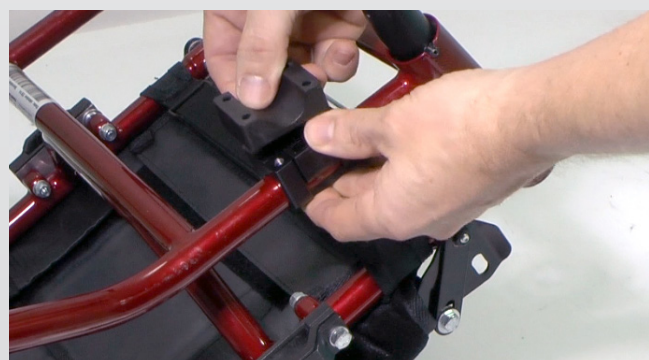



4) Place part 5 on part 3.

5) Mount the screws through the parts. The two long screws should be on the "inside" of the chassis and the two short on the "outside".

6) Tighten the screw slightly, a few turns, with allen key 4 mm.

7) Enter the rear axle into the attachment and continue to mount the attachment on the other side, done in the same way.

8) Before mounting part 5, place the rear axle on the attachment.



9) Place part 5 over the rear axle, mount the screws and tighten them slightly.




10) Adjust the rear axle to get the right camber angle. The bulge should face the floor when the wheelchair is standing up.



11) Adjust the rear axle settings to the desired measure, on both sides.

Standard is 22 mm or 52 mm with back rest moved forward, width 24 cm.

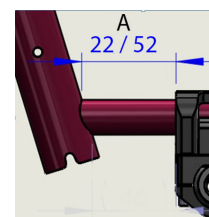

12) Finally tighten the 8 screws firmly.