

BROMS BAMBINO 3

Monteringsanvisning för:

Broms Bambino 3

art.nr. 4630201, 4630202, 4630301, 4630302, 4630300

Verktyg som behövs:

Insexnyckel 5 mm

OBS! Innan justering av broms se till att däck är pupmade till 8 bar.



1) Montera bromsen på chassit genom att använda insexnyckel 5 mm och skruva på skruven (1). Dra inte åt skruven helt ännu.



2) Sätt bromsen i aktiverat (bromsat läge) genom att föra bromsspaken (2) framåt,



3) Skjut bromsen längs chassi-röret tills bromsbladet (3) går emot däck.



4) Kontrollera att fästet (4) är vinkelrätt mot sitsen





5) Öppna / deaktivera bromsen igen genom att föra bromsspaken (**Pos 2, Fig. 2**) uppåt utan att rubba fästets position på chassit.

Skjut nu fästet (**4**) ca 4 mm bakåt på chassit. Se till att klämman bottnar uppåt mot ramröret. Dra sedan fast skruven (**1**) helt.

Kontrollera även att fästets lutning mot stolen inte ändras (Fig 4)

Kontrollera bromsverkan.