
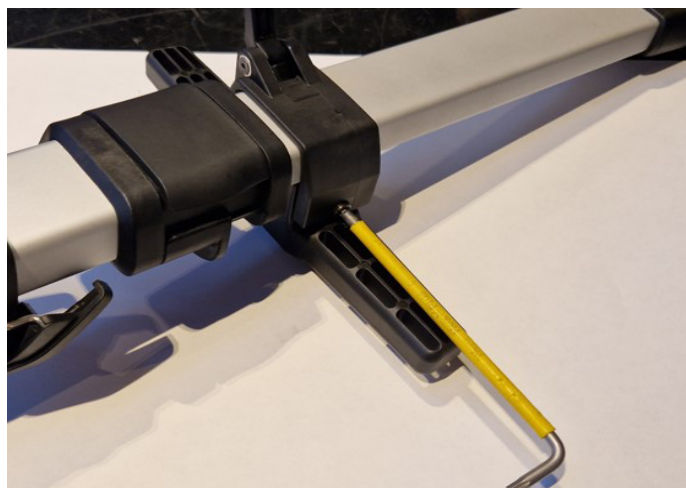


BRÖSTSELE FÄSTE - BAMBINO 3


Monteringsanvisning för:
Bröstselefäste Bambino 3; Art.nr. 4710120

Monteras på körbåge Bambino 3 art.nr. 4233000


Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm

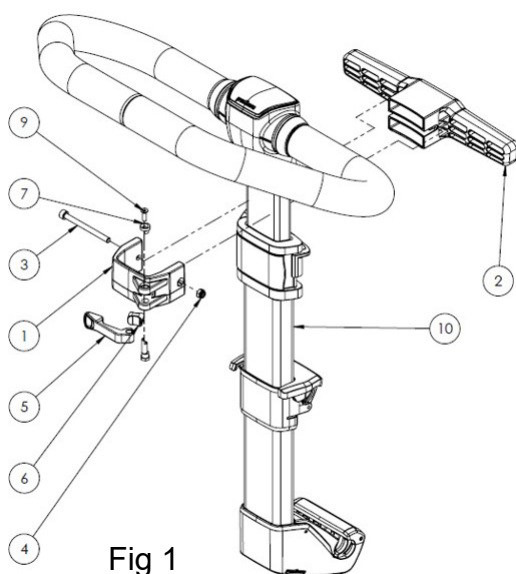

- 1)
Ta fram Körbåge Bambino 3 (nr 10 i Fig.1) och montera fästet (nr 1 och 2 i Fig.1) runt aluminium röret.
Drag åt skruven (nr 3 i Fig. 1) med insexnyckel 4 mm.

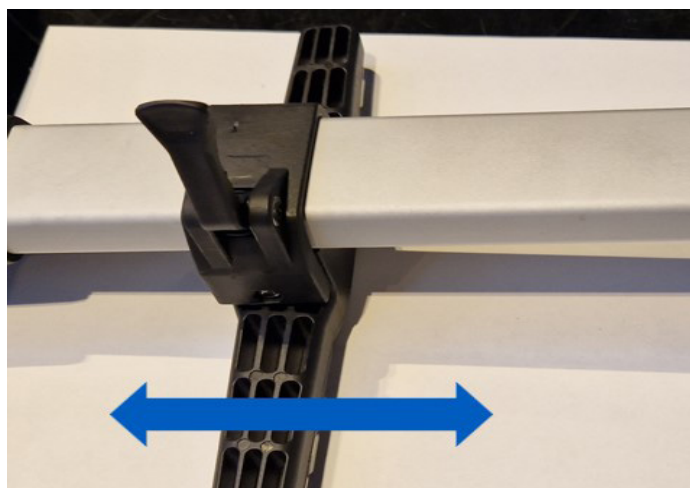

- 2)
Justera positionen på fästet till önskat läge på aluminiumröret.

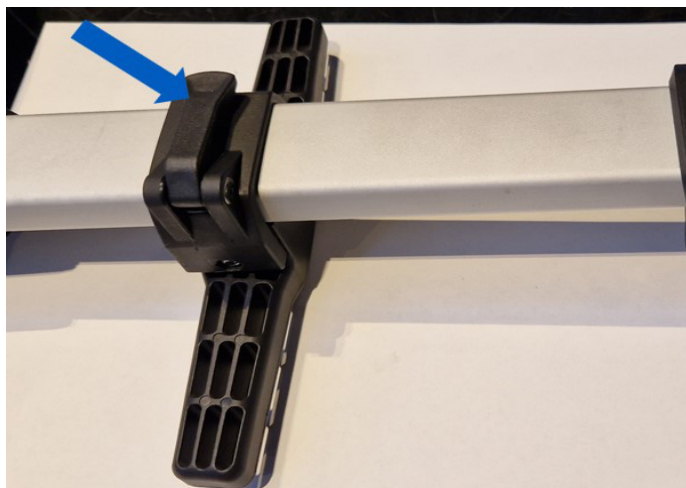

- 3)
Fäll in spaken för att låsa fästet i det inställda läget.

HARNESS ATTACHMENT ON PUSHBAR BAMBINO 3

Assembly instruction för:
Harness attachment Bambino 3; art.no. 4710120

To be mounted on the Push bar Bambino 3 art.no. 4233000

Tools needed:
Allen key 4 mm



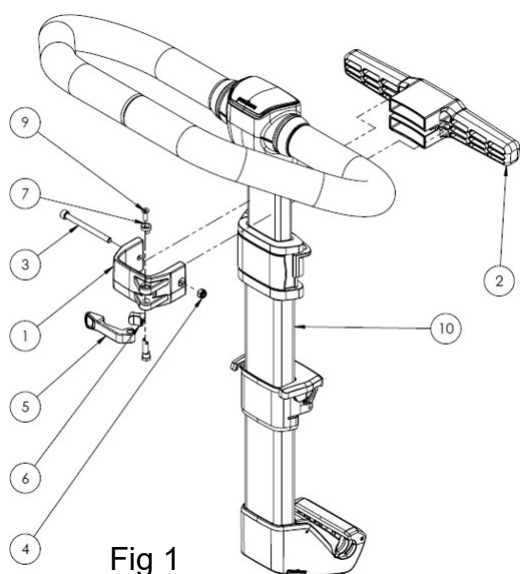



Fig 1

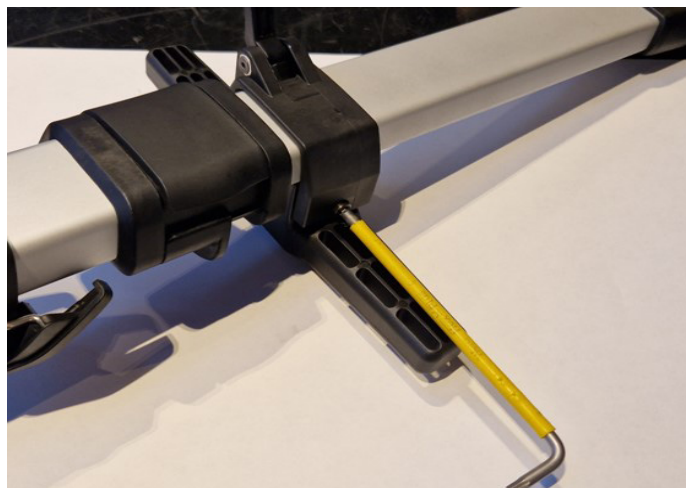

1)
Bring out the Push bar Bambino 3 (nr 10 in Fig.1) and mount the attachment (nr 1 and 2 in Fig.1) around the aluminum tube.
Tighten the screw (nr 3 in Fig. 1) with allen key 4 mm.

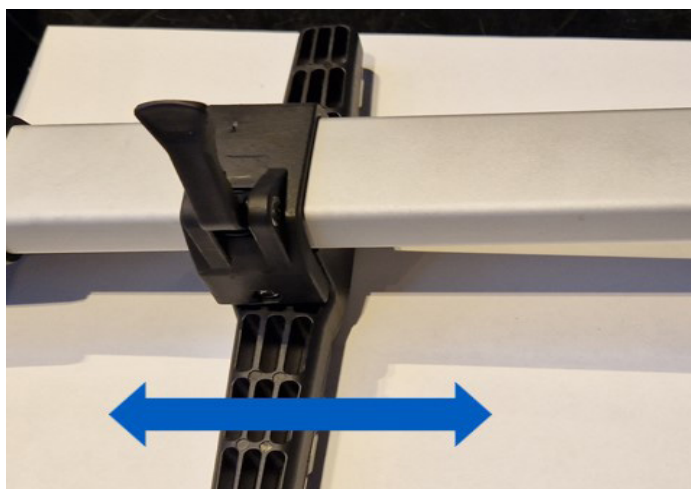

2)
Adjust the attachment to the desired position on the aluminum tube.

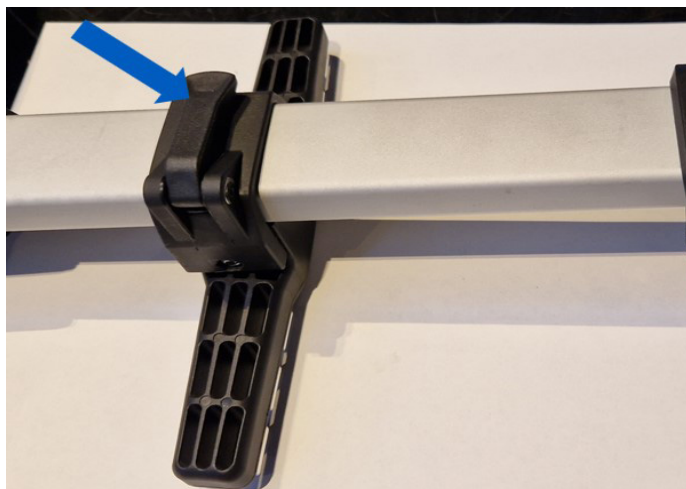

3)
Close the lever to lock it the selected position.