



HUVUDSTÖD BAMBINO 3


Monteringsanvisning för:
Huvudstöd Bambino 3
art.nr. 4401402, 4401403

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm
Insexnyckel 2,5 mm


Montera huvudstödsfäste



- 1)**
1. Klämma Fäste Huvudstöd B3
2. Mellanbit Fäste Huvudstöd B3
3. Bult MC 6S M5x60
4. Mutter M5 (bild 2)
5. Låsspak H/S körhandtag S3


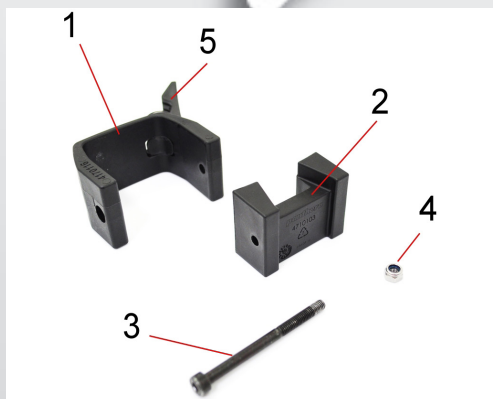


- 2)** Ta isär klämman genom att skruva ut skruv nr 3 med 4mm insex
Ta bort "mellanbit fäste" nr 2
Se till att "låsspak" nr 5 är utfälld när du gör monteringen

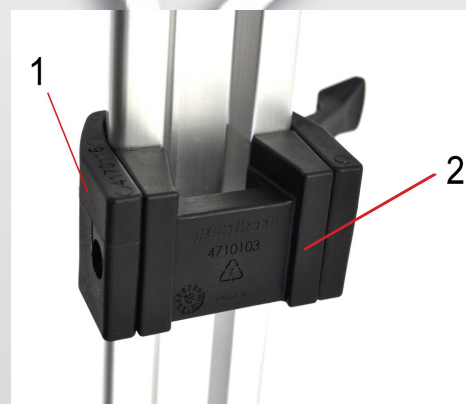


- 3)** Trä på klämman (1) bakifrån över körbågens aluminiumprofil. Återmontera mellanbit (2).
Trä i skruv (3) och mutter (4) skruva åt ordentligt

Om du trycker in låsspaken (5) skall klämman vara fast på aluminiumprofilen och inte kunna röra sig upp och ner
Om du lossar låsspaken (5) skall nu klämman kunna röra sig upp och ner längs aluminiumprofilen

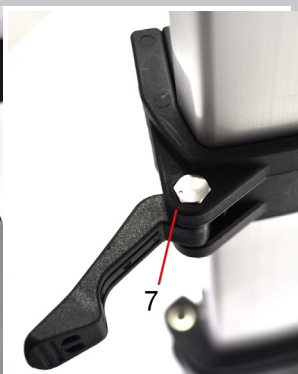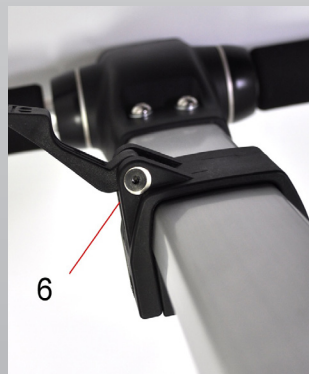


- 4)** Om Klämman inte sitter fast tillräckligt kan spänningen justeras.
Detta gör du genom att lossa skruv (6) med 2,5 mm insex, trycka ut exenter (7), vrida båda dessa in mot klämmans centrum och sedan dra åt igen

Montera huvudstöd

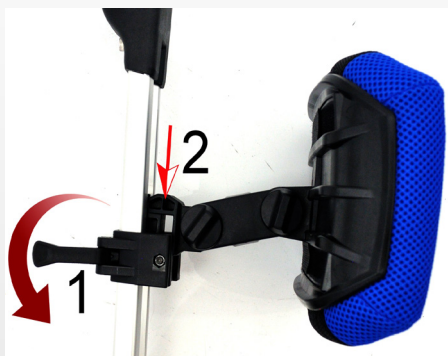


5) -Öppna fästets låsspak
Trä ner huvudstödet fästake ner i kläman.
Stäng låsspak

Justera huvudstöd

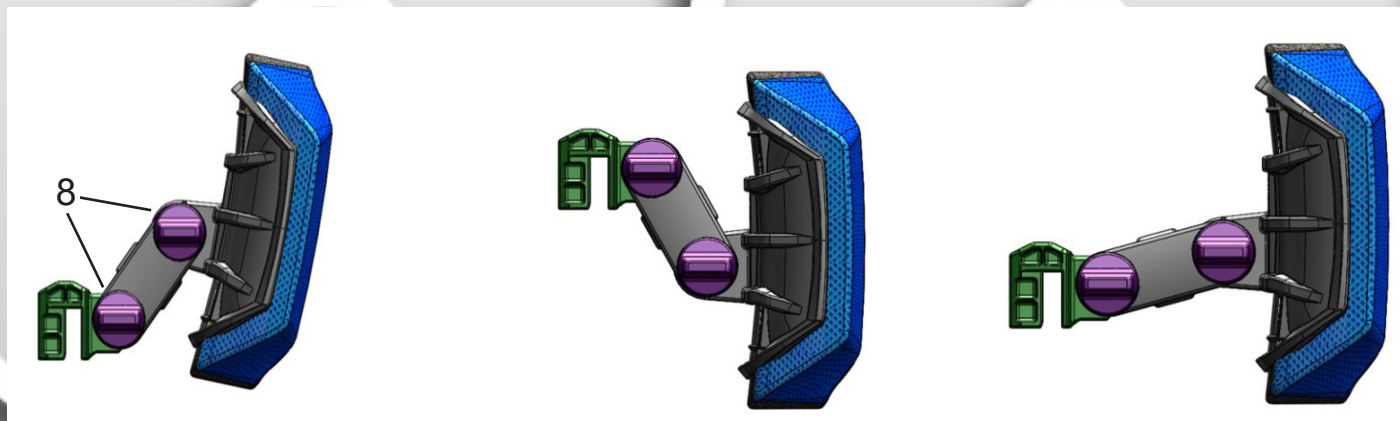

6) Djup, vinkel, höjd
Lossa båda vreden (8). Skruva ut dessa cirka 3 varv. Armen går nu röra fram och tillbaka för önskat läge på huvudstödsdynan.

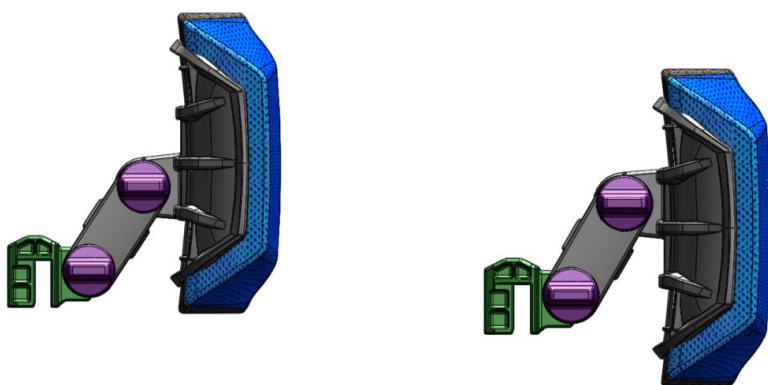

Platta vänd uppåt

Platta vänd nedåt

7) Huvudstödsdynan kan monteras i hög- eller lågläge. Skillnad blir 30mm (+/-15mm)
För att vända håll på plattan skruva ur det vred (8) närmast huvudstödsdynan helt
Lätta ett par varv på det borte vreden.
Bänd isär armarna- ta ur huvudstödet- vänd på det.
Skruva in båda vreden igen.