

# panthera®

## Monteringsanvisning

### U2 light-broms på äldre X chassi

Gäller art.nr. 3673300X  
3683300X  
3673600X  
3683600X  
3674200X  
3684200X



De tidiga Panthera X rullstolarna hade en U2light enhandsbroms monterad. Monteringen skiljer sig mot monteringen av X bromsen på senare Panthera X chassin.

Rullstolen, **fig.1**, upp och ned med drivhjulen demonterade och den monterade bromsen sedd underifrån.

Fästet för bromsen **fig.2** på chassit har 3 st hål för att kunna justera bromsen efter storleken på drivhjulen. 24", 25" resp. 26". Hålet närmast drivhjulet är för 24" drivhjul.

Fatta tag i bromsen **fig.3** och för in skruven "A", **fig. 8**, i hålet på bromsen, fortsätt med bricka "C" och "B", **fig. 4**, därefter monteras fjäderfäste "D" där fjädern ska hakas fast i skruven på bromsen enl. **fig. 5**. Trä sen på distansen "E" på skruv "A" enl. **fig. 6**. Välj sen hål enl. **fig 2** och drag åt skruven "A" med blocknyckel 15 mm med inte allt för stor kraft. Upprepa proceduren på den andra sidan. Montera tillbaka drivhjulen och testa bromsen.

