


Bambino-kit för Freewheel




Verktyg som behövs:


Insexnyckel 4 mm
Blocknyckel 10 mm
Penna
Vinkelhake
Linjal
Borr 6 mm
Bambino Freewheel-kit

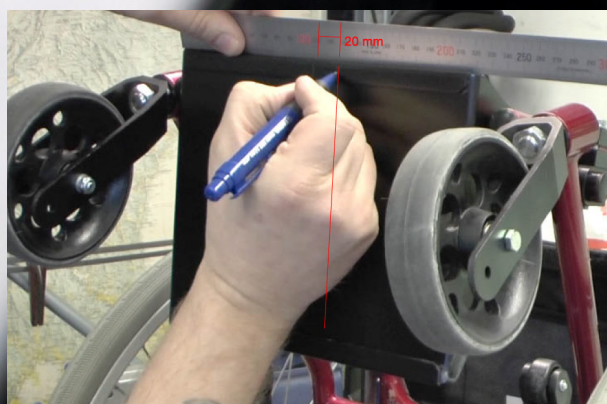


Hitta mitten på fotplattans undersida och lägg till 20 mm från centrum, som är halva bredden på fästet, och dra ett streck med en penna.

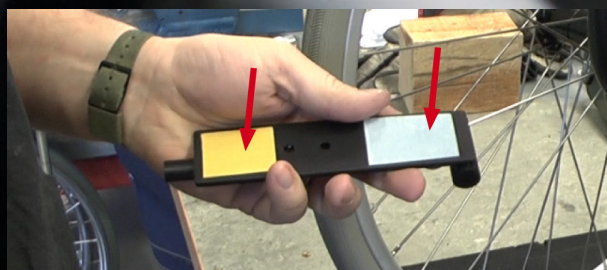


Ta bort skyddspappret från den dubbelhäftande tejpén på undersidan av fästet.

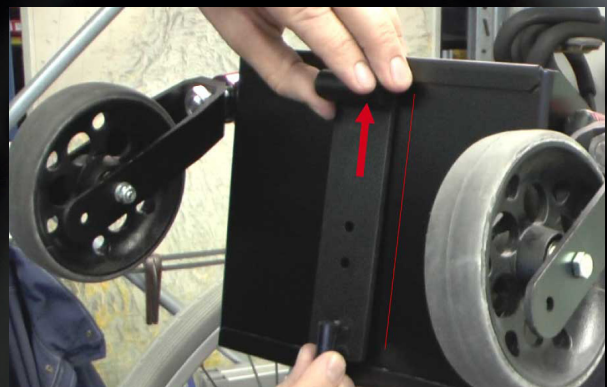

Rikta in fästet efter den ritade linjen i sidled och lägg an fästet mot den övre kanten och tryck fast den mot fotplattan. Fästet ska hamna i centrum i sidled och mot den övre kanten på fotplattan.

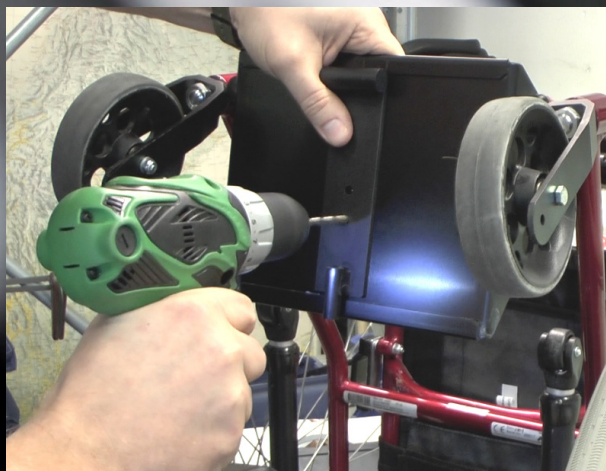


Gör bormärken med ett körslag i det båda hålen i fästet och borra igenom fotplattan med en 6 mm borr.

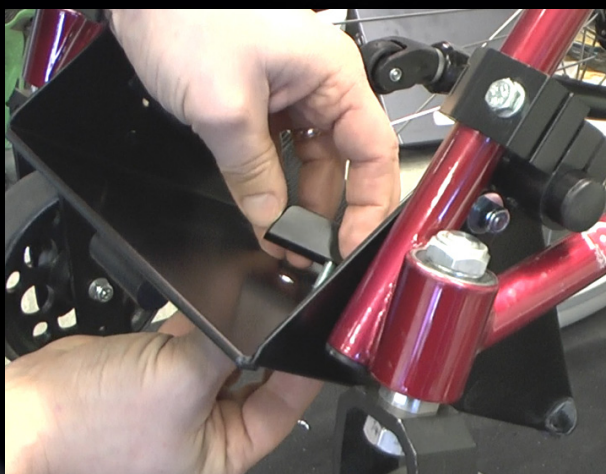

Fäst styrklacken med skruvarna. Använd brickor till skruvarna och applicera en klick Loctite på gängorna. Drag åt skruvarna ordentligt.



Montera skruv och ena delen av klämfästet på stabiliseringsstaget som ska klämmas fast runt chassiröret.

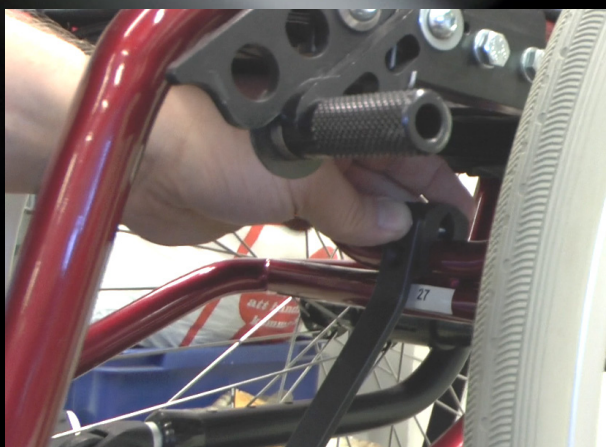

Montera den andra delen av kämfästet och fäst staget i chassit som bilden visar. Montera på muttern och drag åt skruven lite löst.

panthera®



Montera skruv och bricka på stagets nedre del som ska fästas i fotplattan.



Drag fast skruven i staget i det gängade hålet i fästet som monterats under fotplattan.
Använd en droppe Loctite på gängan. Drag åt ordentligt.



Justera in stagets infästning i chassit så att det hamnar i mitten och drag åt skruven ordentligt.



Klart!