



BROMSBLAD TILL S3 BROMS

Monteringsanvisning för:
Bromsblad till S3 broms


art.nr. 4630150, 4630146, 4630120, 4630123
4630124, 4630012

Verktyg som behövs:

Insexnyckel 4 mm




Länk till video

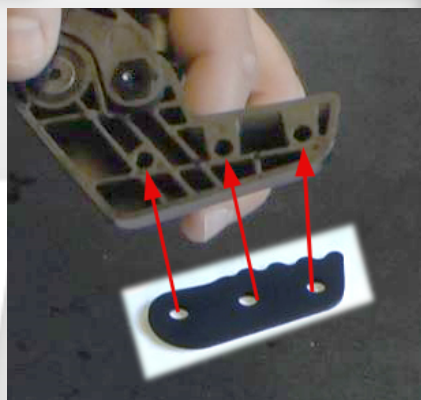

1) Passa in hålen på bromsbladet mot hålen på undersidan av broms S3.



2) Montera första skruven och drag åt den för hand något varv.

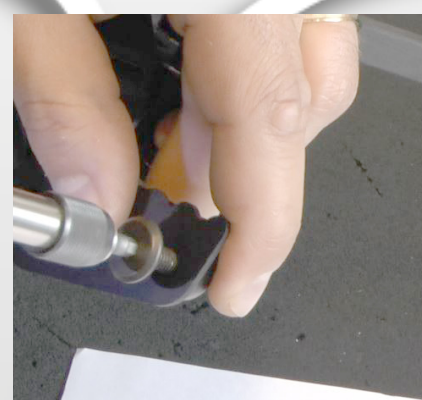

3) Drag åt skruven nästan i botten med skruvdragare eller handverktyg. Insex 4 mm.



4) Fortsätt med de övriga skruvarna på samma sätt.



5) Drag slutligen åt alla skruvar ordentligt i botten.



6) Klart. Upprepa proceduren på den andra bromsen.