




Monteringsanvisning

Justering av quick-release(QR)-axel




Genom att kalibrerar längden på quick-releaseaxeln kan man justera glappet för drivhjulens infästning i bakaxeln på rullstolen.

OBS! Det måste finnas ett litet glapp annars finns risk att quickreleaseaxeln inte låser fast hjulet ordentligt.

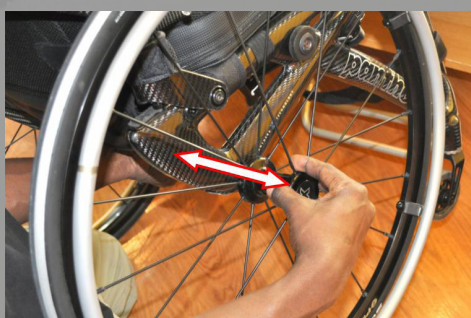


Lyft upp rullstolen baktill tills drivhjulet går fritt från golvet. Ta tag i ekrarna nära navet med ena handen (se bild) och drag i hjulet in och ut för att kontrollera glappet. Glappet ska vara ca 0,1 -0,2 mm.

OBS! Det måste finnas ett litet glapp annars finns risk att quickreleaseaxeln inte låser fast hjulet ordentligt.

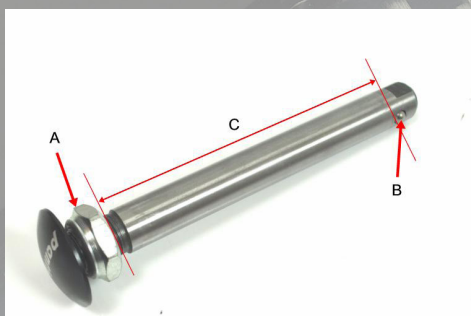

Lossa drivhjulet och ta ut quickreleaseaxeln. Kalibrera längden på axeln genom att skruva på muttern (A). Måttet (C) mellan baksidan på muttern och fram till den fjädrande kulan (B) avgör hur stort glappet ska bli när drivhjulet är monterat.

Det är den fjädrande kulan (B) som låser fast drivhjulet i bakaxeln när den fjädrar ut, därför måste det finnas ett litet glapp som säkerställer att kulan hoppar ut när drivhjulet är monterat.

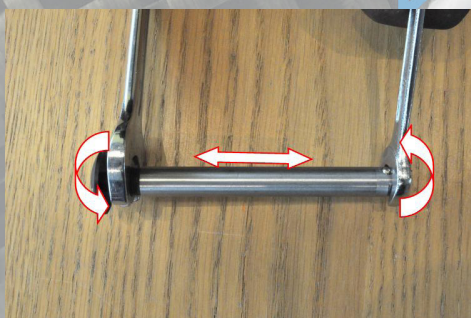

Använd två stycken fasta nycklar, 11 och 19 mm för att justera måttet (C) med muttern.

Montera quickreleaseaxeln och drivhjulet och kontrollera att önskat glapp har erhållits.

OBS! Kontrollera att drivhjulen är ordentligt monterade innan rullstolen tas i bruk igen.