

## Monteringsanvisning för körhandtag fasta

### Så här monterar du dina fasta körhandtag:

1. När körhandtagen levereras till dig är dom ihopmonterade och kompletta.
2. För att montera på dessa körhandtag på din rullstol är steg 1 att ta bort den ändpropp som sitter på toppen av ryggstativet.
3. Skruva sedan ut skruven (6) ur körhandtagsröret, och ta bort brickan (7).
4. Se till att låsklossens (5) gänga syns i hålet på körhandtagsröret (2).
5. Tryck ner körhandtagsröret i ryggstativet till du kan se låsklossens gänga i hålet på ryggstativet.
6. Skruva sedan fast bricka och skruv ordentligt in i ryggstativet.
7. Prova att dra upp körhandtaget. Sitter det fast ordentligt så har du lyckats, men kan du dra upp det har du antingen inte skruvat åt ordentligt, eller så har låsklossen vridit sig så att gängorna inte ligger åt rätt håll.
8. Gör likadant med nästa körhandtag.

