

### KÖRHANDTAGSFÄSTE S3 FÖR RYGG TIDIGARE



Monteringsanvisning (justering sid 2) för:  
Körhandtagsfäste S3, för **tidigare rygg**;  
art.nr. 4252300

Verktyg som behövs:  
Bits med Insex 4 mm och ev. spärrskaft  
Nyckel 8 mm, 10 mm  
Insexnyckel 2,5 mm



1) Öppna upp rygglädseln för att komma åt lättare.




2) Tag fram fästet, finns i höger resp. vänster utförande, placera den "stängda" metallkoppen i det stora hålet på fästet, inifrån.



3) Öppna upp fästet och placera det runt ryggröret. Låt metallkoppen styra upp fästet på kutsen på baksidan av ryggröret. Kläm ihop fästet och montera M5 skruven i det övre hålet på fästet.



4) Drag åt skruven odentligt med insexnyckel 4 mm.  
Upprepa proceduren på höger sida,

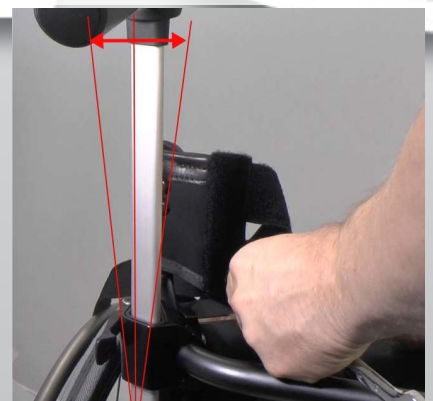

5) Om man behöver justera vinkeln på körhandtagen kan man vrida på den excentriska metallkoppen med en 10 mm nyckel.  
Börja med att släppa lite på skruven som håller fästet i ryggröret.



6) Använd en 10 mm nyckel och vrid på metallkoppens framåt eller bakåt tills körhandtaget är lodrätt.



7) Drag åt skruvarna till fästet. Upprepa proceduren på andra sidan.

## JUSTERING AV LÅSARM



1) Om låsningen av körhandtaget är otillräcklig eller glapp kan man justera detta, enl. följande instruktion.




2) Demontera körhandtaget. Lossa på denna skruv några varv med insexnyckel 2.5mm.




3) Tryck ned skruven tills muttern på undersidan blir synlig.



4) Justera låskraften genom att vrida muttern moturs, uppifrån sett, för att öka låskraften och medurs för att minska den. Vrid muttern ett kvarts varv, skruva åt skruven och prova låskraften. Använd nyckel 8 mm.

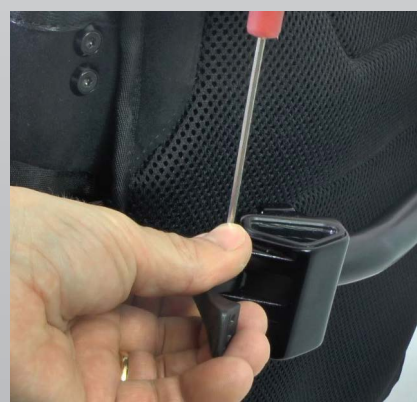

5) Drag åt skruven och se till att muttern glider in i fästet ordentligt.

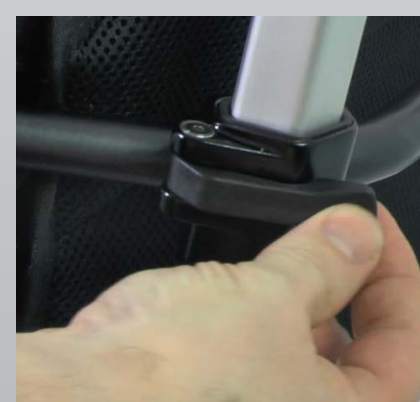

6) Montera körhandtaget och kontrollera att låskraften är tillräcklig. Behövs justering, upprepa steg 3-5.