


### TIPPSKYDD S3

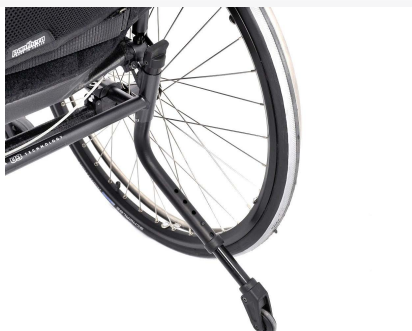


Demontering / Monteringsanvisning för:  
Tippskydd S3;  
art.nr. 4353000, 4353030, 4353060, 4353080

Verktyg som behövs:  
Specialverktyg från Panthera  
Insex 2,5mm  
Insex 5 mm


### DEMONTERING



1) DEMONTERING  
Börja med att lossa vredet med insex-  
nyckel 2,5 mm.

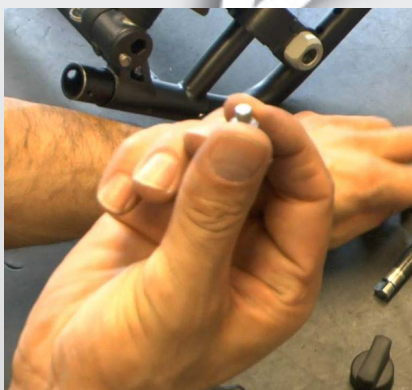

2) Tag fram låsniten som följer med de  
nya tippskydden. Den används för att  
låsa den fjäderbelastade hylsan inne i  
tippskyddet i utdraget läge.

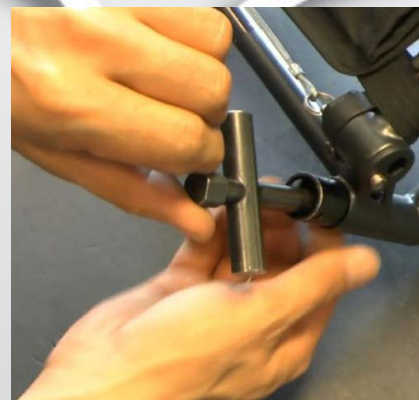


3) Tag fram specialverktyget och stoppa  
ned i det i tippskyddet och genom att  
vrida på knoppen haka fast fjäderbelas-  
tade hylsan och lyft upp den. Har man  
inte specialverktyget kan man även lirka  
upp fjädern med t.ex. en gammal hjule-  
ker. [LÄNK](#)



4) I utdraget läge så placera låsniten i  
hålet när hylsan är utdragen. När den  
fjäderbelastade hylsan är låst i utdraget  
läge så tag bort specialverktyget.




5) Lossa och tag bort tippskyddets läs-  
skruv..

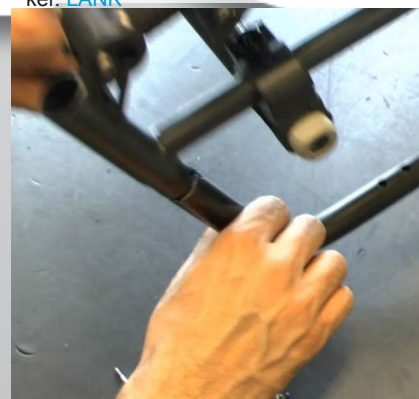

6) Drag loss tippskyddet från ramen.

Upprepa samma procedur 1-6 på det an-  
dra tippskyddet.

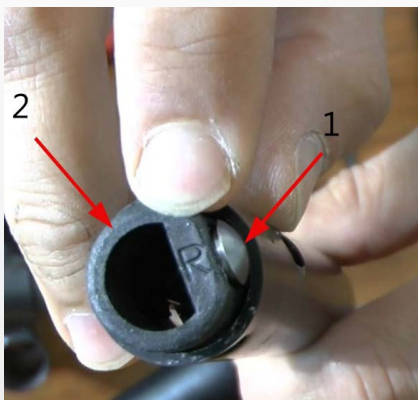


### 1) MONTERING

Tag fram det nya tippskyddet och observera att tippskydden är märkta med "R" för höger och "L" för vänster sida. Använd en nit (1) eller skruv för att låsa hållaren (2) i utdraget läge.



2) För in tippskyddet i sitt fäste i ramen.

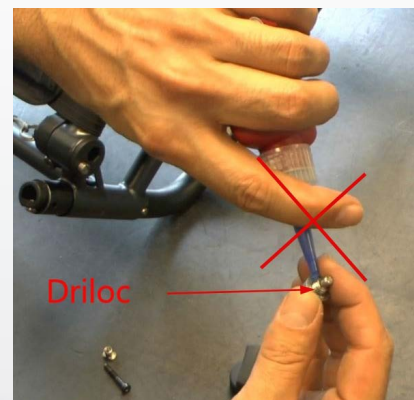

3) Låsskruven till tippskyddet är förbehandlad med "Drilloc", vilket betyder att man inte behöver applicera Loctite på skruven innan montering.



4) Drag åt skruven som låser tippskyddet i ramen ordentligt.



5) Tag fram specialverktyget och använd det för att lyfta upp hylsan. När den är utdragen så pilla bot låsniten och släpper hylsan i tippskyddet. Har man inte specialverktyget kan man även lirka upp fjädern med t.ex. en gammal hjuleker.

[LÄNK](#)



6) Montera tillbaka vredet på tippskyddet och skruva åt. Upprepa procedur 1-6 på det andra tippskyddet.