


Montering av tippskydd S3

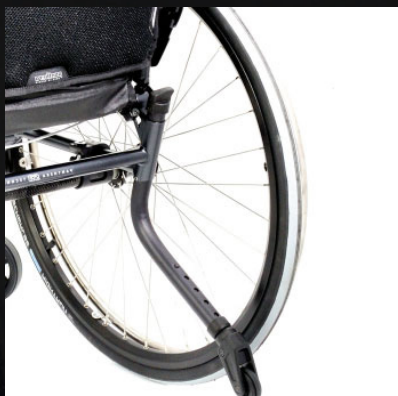

Demontering

Lossa skruven till vredet med en insexnyckel 3 mm och ta bort vredet.



Använd t.ex. en gammal eker från ett drivhjul för att få tag i och lyfta upp den fjäderbelastade hållaren.



Använd en nit eller skruv att stoppa i hålet på hållaren för att låsa den i utdraget läge.






Demontera skruven som håller fast tippskyddet i chassit med insexnyckel 5 mm.



Dra loss tippskyddet från chassit.

Montering

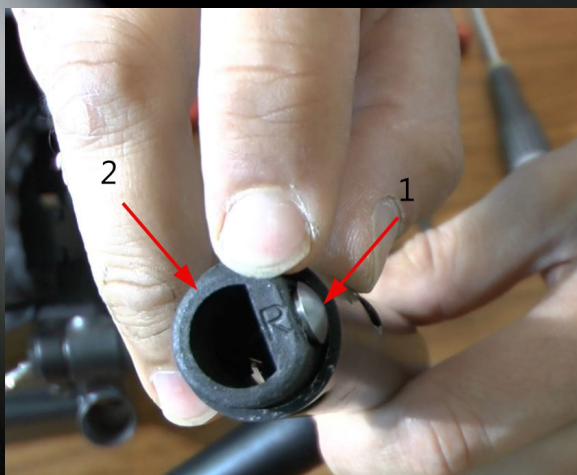

Tippskydden är märkta med "R" för höger och "L" för vänster sida. Använd en nit (1) eller skruv för att låsa hållaren (2) i utdraget läge.



För in tippskyddet i röret i chassit.



Montera skruven som låser tippskyddet i chassit med insexnyckel 5 mm.



Använd ekern och håll fast hållaren samtidigt som niten eller skruven tas bort, samtidigt låt hållaren glida ner i ramröret.



Använd sen en mejsel och vrid hållaren moturs (på höger sida, medurs på vänster), tills hållare äntrar sitt spår och glider ytterligare en bit.



Montera till sist vredet och skruva fast med insexnyckel 3 mm.