

Alla Panthera modeller.

Se nästa sida för kompletterande info om **Panthera X**, som är tillverkad i kolfiber.

Din Panthera är byggd så att den är nära nog underhållsfri. Några få delar behöver du dock regelbundet se över. (Självklart måste du rengöra och **se över stolen oftare** om du använder den i mer extrema miljöer, exempelvis i **sand och saltvatten**)

Förvaring

Vid förvaring av din rullstol i 4 månader eller mer ska den placeras i ett torrt, varmt utrymme. Efter förvaring, kontrollera lufttryck i däcken och skicket på klädseln.

Löpande underhåll

För det löpande underhållet, behöver du följande:

- bilschampo eller liknande.
- avfettningsmedel (för avlägsnande av hårt sittande fett och smuts).
- universalolja, till exempel, CRC 5-56.

En gång i månaden skall du:

• Torka av stolens chassi med bilschampo eller diskmedel och fuktig trasa. Vid hård nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. Smörj alla rörliga delar med 5-56, universalolja, efter tvätt.

• Rengöra vid framhjulets infästning i gaffel (mellan hjul och gaffel). Här samlas ofta hår och damm med mera vilket medför att lagrena kan skadas. Lossa hjulbulten med insexnyckel 4mm och ta bort hjulet. Rengör sedan distanserna som sitter mellan hjul och gaffel och torka av hjulens lager utvändigt med en trasa. Droppa en droppe olja i varje lager. Montera sedan detaljerna åter.

• Smörja axeln till drivhjulet. Tag av hjulet och fördela några droppar olja över axeln. Kör du i regn, sand, salt och slask eller sällan tar av hjulen bör du göra detta oftare.

• Pumpa däcken genom att skruva av locket från ventilen och därefter fylla med luft med lämplig ventiladapter, för korrekt däckstryck. (se Tekniska Fakta i Bruksanvisningen).

• Kontrollera alla skruvar och muttrar, dra åt dem vid behov.

• Kontrollera att stolen ej fått några skador. Om skada uppkommit, kontakta omedelbart oss på Panthera AB.

Två gånger om året skall du:

• Smörja rörliga delar på bromsen med några droppar olja.

• Smörja bussningen vid ryggstödet ledpunkt. Smörj bussningen med några droppar olja.

• Tvätta sittklädseln, ryggklädseln och sittdynans överdrag i 60 °C maskintvätt vid behov. Fäst ihop kardborren, hane mot hona för att undvika att klädseln noppas av kardborren under tvätt

Hjälp med service eller reparation

För hjälp med service eller reparation kontaktar du i första hand din Hjälpmedelscentral. Du kan också kontakta oss på Panthera för hjälp och svar på frågor:

Panthera X

Kolfiber, skötsel och service

CFRP - Kolfiberförstärkt plast är starkare, lättare och mer uthålligt än metall, men uppför sig annorlunda när en skada uppträder. Metall böjer sig och deformeras vid en skada. När CFRP strukturen brister så tappar den sin styrka och stabilitet, men utan de varningssignaler som metall visar, som böjning och knäckning.

CFRP är känslig för skador gjorda med vassa kanter, kraftiga stötar och ovanliga punktbelastningar. Om du misstänker att din rullstol blivit skadad, undersök hela chassit noga eller låt en specialist kontrollera den.

VIKTIGT

CFRP - Kolfiberförstärkt plast är ett väldigt starkt och lätt material, men också väldigt känsligt för kraftiga stötar och vassa föremål. Sprickor och andra skador på kolfiberstrukturen, orsakat av t.ex. ett fall bakåt mot hårt underlag kan leda till plötsliga brott på chassit.

Undvik:

- Tappa chassit på hårda underlag
- Repa eller skrapa kolfiberstrukturen

INSPEKTERA DIN RULLSTOL REGELBUNDET

Tryck på områden som du misstänker har blivit skadade.

– leta efter onormal svikt eller sprickor i materialet.

För handen över chassit och leta efter sprickor eller lösa fibertrådar. Gör mjuka, långsamma rörelser för att undvika att få flisor i handen. Om du upptäcker nånting som visar på skada, kontakta Panthera AB. FÖRSÖK INTE laga skadan själv.

Hjälp med service eller reparation

För hjälp med service eller reparation kontaktar du i första hand din Hjälpmedelscentral. Du kan också kontakta oss på Panthera för hjälp och svar på frågor:

www.panthera.se panthera@panthera.se +46-8-761 50 40